


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

DISPOZITIV HIDROGEN H2+ 6IN1



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud DC 2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024

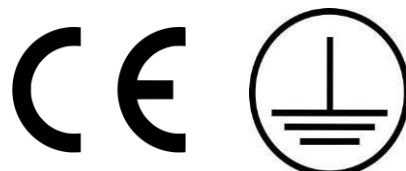

Dispozitivul Hydrogen H2+ este un dispozitiv inovator de îngrijire facială care permite mai multe tratamente de îngrijire, curățare și întinerire a pielii. Acest dispozitiv combină până la 6 elemente care îndeplinesc funcții diferite.

Date tehnice:

Tensiune	220-240V 50Hz
Putere	160W
Frecvența ultrasunetelor	1Mhz
Dimensiuni	46x30x43.5cm

Funcțiile dispozitivului:

UNDE RADIO (RF) - Capul emițător de unde radio generează căldură care penetrează pielea și straturile profunde ale pielii. Aceasta încălzește fibrele de collagen, care se micșorează, rezultând un tonus ferm al pielii și o structură reînnoită a pielii. Acest tratament îmbunătățește ovalul feței, reduce ridurile și strânge pielea.

ULTRADISCAȚIE - Capul cu ultrasunete permite injectarea substanțelor active adânc în piele. Acesta oxigenează pielea, făcând tenul să pară mai tânăr și mai radiant.

Curățarea cu hidrogen (HYDRABRAZION)- Acest tratament presupune curățarea pielii și exfolierea pielii moarte. Rezultatul tratamentului este o piele netedă, profund hidratată și radiantă.

COOLING HEAD - Masajul cu acest cap este conceput pentru a calma pielea iritată după tratamente, precum și pentru a contracta vasele de sânge și a reduce eventualele roșeață.

OXYGEN SPRAY - Capul "SPRAY" permite aplicarea unui hidrolac sau a unei fiole speciale, de exemplu hidratantă, regenerantă sau oxigenantă. Tratamentul cu acest cap are un efect calmant și de fermitate asupra pielii.

PEELING DE CAVITAȚIE - Acesta este un mod nedureros de curățare a celulelor moarte din stratul cornos al pielii. Îmbunătățește tonusul pielii și reduce numărul punctelor negre.

Precauții:

- 1) Nu utilizați un dispozitiv care este conectat la mai multe surse de alimentare;
- 2) Când schimbați siguranța, opriți butonul de alimentare pentru a evita incendiile, șocurile electrice;
- 3) Utilizați o sursă de alimentare de 220 V $\pm$ 22 V, 50 HZ $\pm$ 1 HZ și o priză de împământare.
- 4) Utilizarea de deteriorat cablu sursa de alimentare riscuri incendiu sau electrocutare șoc electric;
- 5) Nu răsuciți sau îndoiți cablul de alimentare pentru a evita incendiul sau șocul electric;
- 6) Atunci când echipamentul este deteriorat, contactați service-ul;
- 7) Nu utilizați echipamentul pe un sol/un mediu instabil, cum ar fi înclinarea, vibrațiile, impactul;
- 8) Nu trebuie să existe apă sau resturi în echipament, în cazul corpurilor străine, vă rugăm să contactați compania;
- 9) Deconectați fișa de alimentare atunci când mutați unitatea;
- 10) Nu mișcați dispozitivul atunci când este pornit;
- 11) Unitatea trebuie așezată pe o suprafață stabilă, lăsând cel puțin 5 cm de spațiu liber pentru a asigura circulația aerului;
- 12) Unitatea nu trebuie să fie acoperită cu nimic pentru a preveni blocarea orificiilor de ventilație;
- 13) Evitați utilizarea echipamentului în următoarele condiții: lumina soarelui, umiditate ridicată, în apropierea apei, vibrații, suprafață înclinată; mediu cu câmp magnetic puternic;
- 14) Echipamentul nu trebuie amplasat în apropierea radiourilor, televizoarelor, copiatoarelor, faxurilor etc;
- 15) Nu poate fi utilizat împreună cu alte echipamente (cum ar fi cuptoarele cu microunde) pentru a evita interferențele reciproce, provocând defecțiuni.
- 16) Vă rugăm să citiți cu atenție manualul de instrucțiuni înainte de a porni aparatul. Utilizatorul trebuie să fie familiarizat cu instrucțiunile de utilizare.
- 17) Asigurați-vă că toate cablurile sunt bine conectate.

18) Parametrii de funcționare ai mașinii, timpul și intensitatea trebuie să fie selectate individual în funcție de nevoile și pielea clientului.

Atenție:

- După tratament, toate piesele de mână trebuie curățate și dezinfectate temeinic în conformitate cu standardele de siguranță actuale. Nu înmuiați capetele care sunt conectate direct la dispozitiv. Acest lucru poate deteriora dispozitivul. Capetele curate trebuie să fie așezate pe suportul care este atașat la aparat.
- Curățați aparatul cu o cârpă, nu utilizați preparate chimice puternice. Dacă aparatul nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, acesta trebuie curățat bine și apa rămasă trebuie aruncată.

Curățarea aparatului:

- După procedura de purificare a hidrogenului, capetele trebuie curățate. Turnați apă filtrată în rezervorul C și curățați capul.
- Ștergeți aparatul din exterior cu o cârpă umedă și apoi uscați-l.

Contraindicații la tratament:

1. Piele sensibilă, acnee foarte severă.
2. Pacemaker, defibrilator cardiac implantabil sau alt dispozitiv electromagnetic implantabil.
3. Diabet sever, hipertensiune arterială și colesterol ridicat.
4. Boli ale pielii bacteriene, virale și fungice.
5. Nevus, hemangioame, cicatrici și răni proaspete pe piele.

Indicații:

1. Probleme ale pielii precum acnee, puncte negre, piele vasculară sau producție crescută de sebum.
2. Curățarea profundă a pielii.
3. Netezirea cicatricilor și a semnelor de acnee.
4. Netezirea ridurilor.
5. Piele uscată care are nevoie de hidratare.

Depozitare: Dispozitivul trebuie să se afle într-o încăpere curată, bine ventilată, cu o temperatură ambientală cuprinsă între 5°C și 40°C și o umiditate relativă de maximum 80%.

Construcția unității:



- ## Capete



1.

2.

3.


4.

5.

6.

- Kitul include: 6 capete de tratament, 6 vârfuri pentru capul de purificare a hidrogenului, 2 vârfuri pentru capul "SRAY", 3 sticle cu ingrediente active (A B C), o sticlă pentru apă curată și folosită, cablu de alimentare și suport pentru cap.

Afișaj:

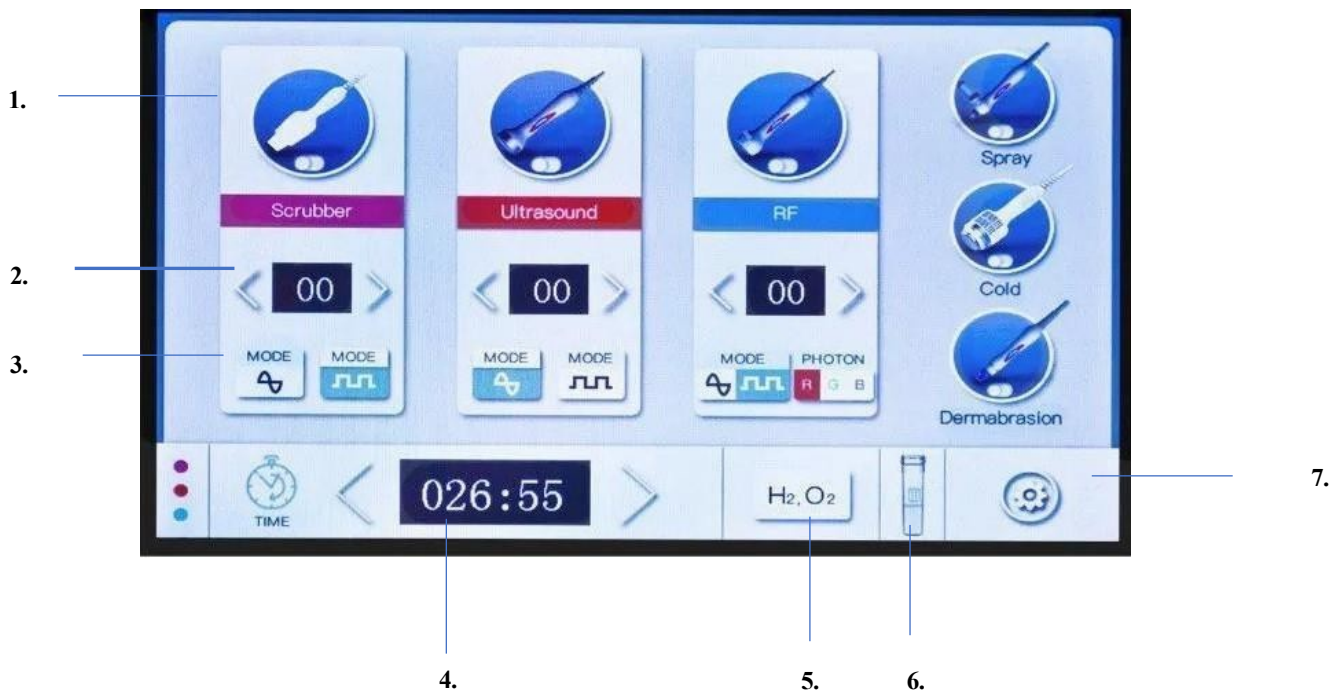

1. Alegerea capului
2. Alegerea intensității
3. Alegerea modului de undă de tratament
4. Durata tratamentului
5. Începutul udării
6. Nivelul consumului de apă
7. Meniu (selectarea limbii)


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE:

1. Spălați și curățați temeinic pielea, îndepărtând orice reziduuri de machiaj, înainte de a efectua tratamentul.
2. Umpleți cu apă rezervorul de apă curată și flacoanele ABC pentru substanțele active (cu o soluție adaptată la tratamentul care urmează să fie efectuat).
3. Conectați capetele la aparat.
4. Conectați aparatul la rețeaua electrică și apoi apăsați comutatorul situat pe partea laterală a aparatului.
5. Ecranul se va aprinde.
6. Reglați timpul de tratament cu săgețile "< >". ">" va crește timpul de tratament, iar "<" îl va reduce.
7. Apoi reglați intensitatea tratamentului, tot cu săgețile "< >" (situate sub pictogramele capului), individual pentru fiecare cap.
8. Selectați modul de cap corespunzător.
9. Apoi faceți clic pe pictograma capului pe care doriți să îl utilizați pentru a începe lucrul.

Funcționarea capetelor:

1. "Cap "SPRAY"

Tratamentul salin este utilizat pentru a curăța pielea, în timp ce în combinație cu fiola corespunzătoare va avea un efect hidratant, oxigenant sau regenerant.

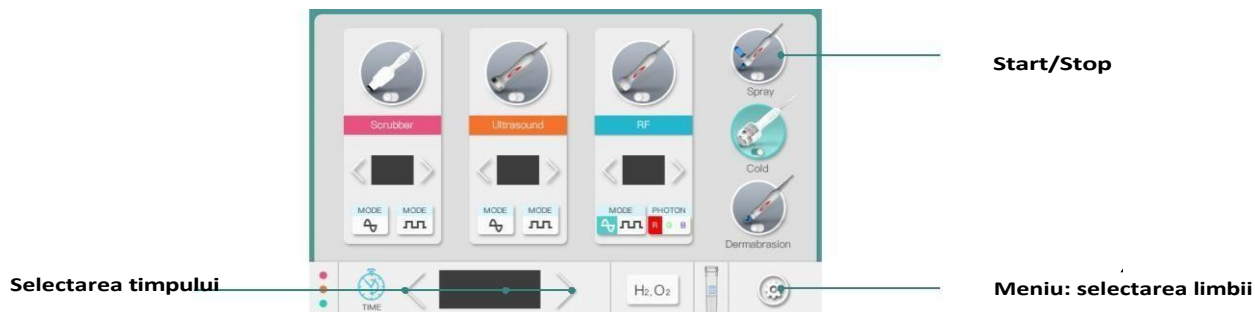


1. Porniți dispozitivul.
2. Turnați preparatul corespunzător în fiola* situată la capul "SPRAY".
3. Selectați timpul de tratament.
4. Faceți clic pe pictograma capului SPRAY, îndreptați capul spre față și începeți tratamentul.
5. Odată ce timpul setat a trecut, tratamentul se va încheia.

* Flaconul pentru capul "SPRAY" este inclus în kit. După fiecare tratament, flaconul trebuie dezinfectat, turnat cu apă purificată/filtrată și capul trebuie curățat conform schemei de mai sus.


2. Cap de răcire

Conceput pentru a calma pielea iritată după tratamentele cosmetice.

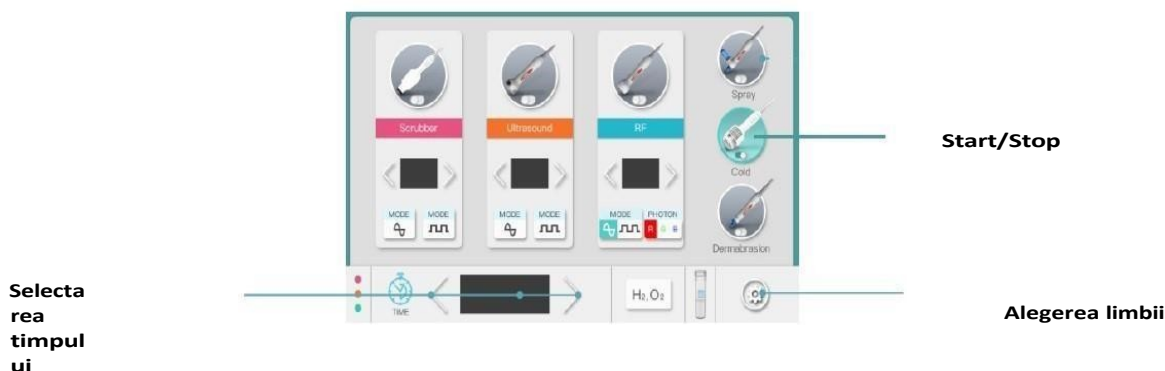

1. Porniți dispozitivul.
2. Selectați timpul de tratament dorit.
3. Faceți clic pe pictograma capului de răcire și începeți tratamentul - înainte de a începe tratamentul, puteți aplica pe piele o fiolă sau un hidrolat pentru a ajuta la ghidarea capului pe piele.


3. Cap de peeling prin cavitație - aceasta este o modalitate de curățare a celulelor moarte din stratul cornos al pielii.

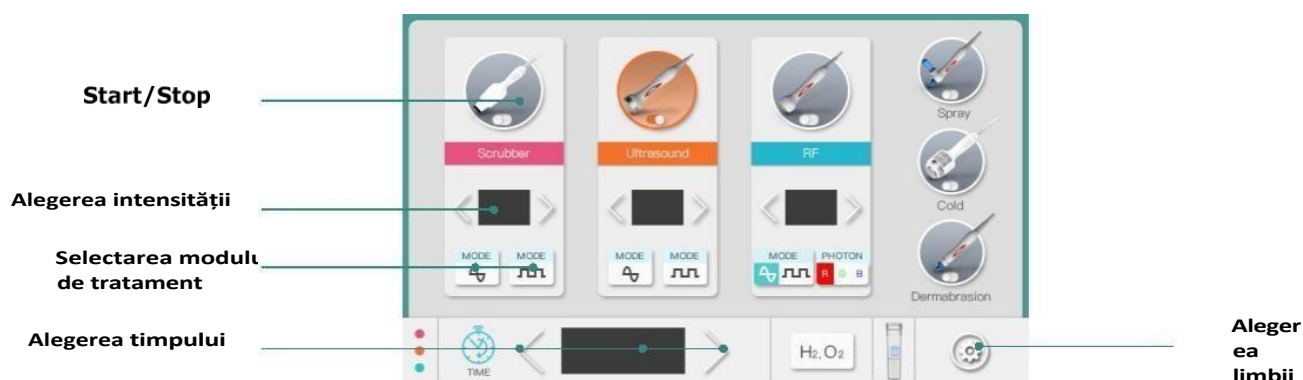


1. Porniți dispozitivul.
2. Selectați modul de undă de tratament adecvat.
3. Selectați intensitatea dorită a tratamentului.
4. Selectați durata tratamentului.
5. Spălați-vă și curățați-vă bine fața înainte de tratament. Aplicați o cantitate mică de apă pe pielea curățată. Vă puteți umezi ușor fața cu un tampon de bumbac înmuiat într-un tonic ușor. Pielea trebuie să rămână umedă în permanență în timpul tratamentului prin cavitate.
6. Faceți clic pe pictograma capului de peeling prin cavitate și începeți tratamentul. Țineți spatula la un unghi de 45° (Fig. 1). Treceți spatula peste față, de exemplu, de la dreapta la stânga sau de jos în sus.

Sonophoresis (masaj cu ultrasunete) - înainte de a începe tratamentul, aplicați fiola corespunzătoare și gelul cu ultrasunete. Spatula trebuie ținută pe ambele părți ale capului, apăsând-o ușor pe piele (Fig. 2). Scopul tratamentului este de a introduce ingrediente active în straturile profunde ale epidermei.

1.

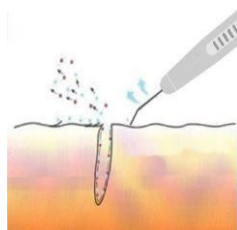


2.

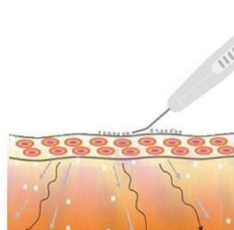

4. Cap de radiofrecvență (RF)

Capul emițător de radiofrecvență generează căldură care penetrează pielea și țesutul subcutanat din piele. Aceasta încălzește fibrele de collagen, care se contractă, rezultând un tonus ferm al pielii și o structură reînnoită a pielii. Acest tratament îmbunătățește ovalul feței, reduce ridurile și strânge pielea.

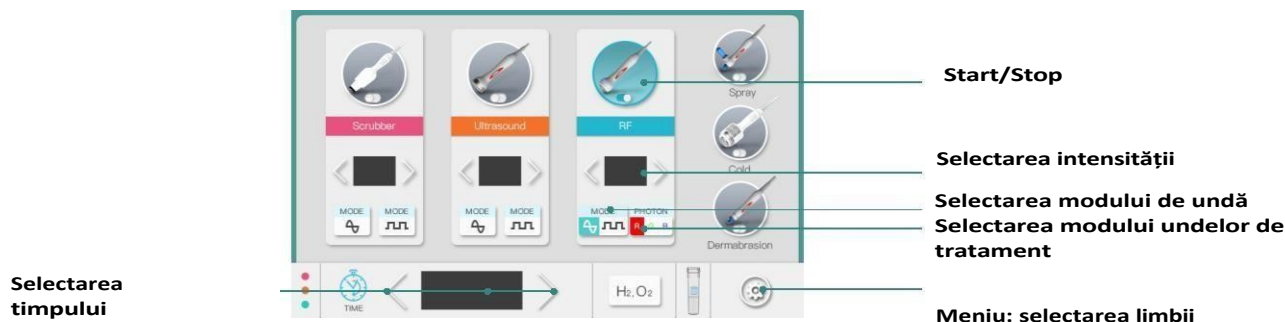


1. Porniți dispozitivul.
2. Selectați modul de undă de tratament adecvat.
3. Selectați intensitatea de tratament adecvată, adaptată clientului.
4. Alegeți timpul de tratament.
5. Aplicați gelul de tratament cu radiofrecvență pe pielea curățată.
6. Faceți clic pe pictograma capului de radiofrecvență și începeți tratamentul.
7. Efectuați mișcări glisante sau circulare cu capul.

5. Cap cu ultrasunete

Introduce substanțele active conținute în produsele cosmetice adânc în piele.


Alegerea timpului

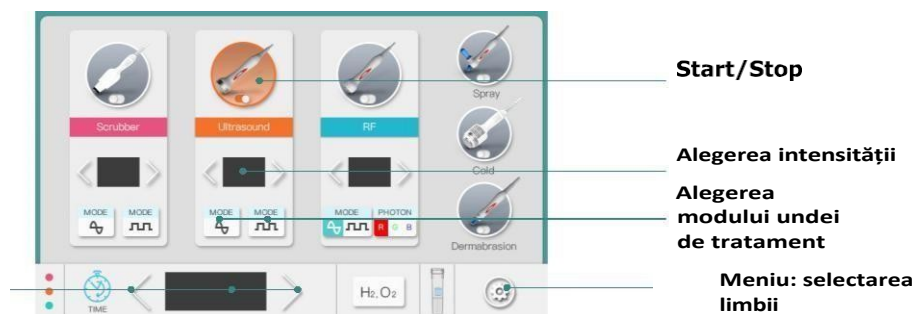

1. Porniți dispozitivul.
2. Selectați modul de undă de tratament dorit.
3. Selectați intensitatea de tratament dorită.
4. Selectați durata tratamentului.
5. Aplicați gel cu ultrasunete pe pielea curățată.
6. Faceți clic pe pictograma capului cu ultrasunete și începeți tratamentul.
7. Utilizați mișcări lente, circulare, timp de aproximativ 5-8 minute.

6. Hydrabrasion- cea mai recentă tehnologie pentru exfolierea pielii moarte cu ajutorul unui cap special. Rezultatul tratamentului este o piele curățată, netedă, profund hidratată și radiantă.

Timp la alegere

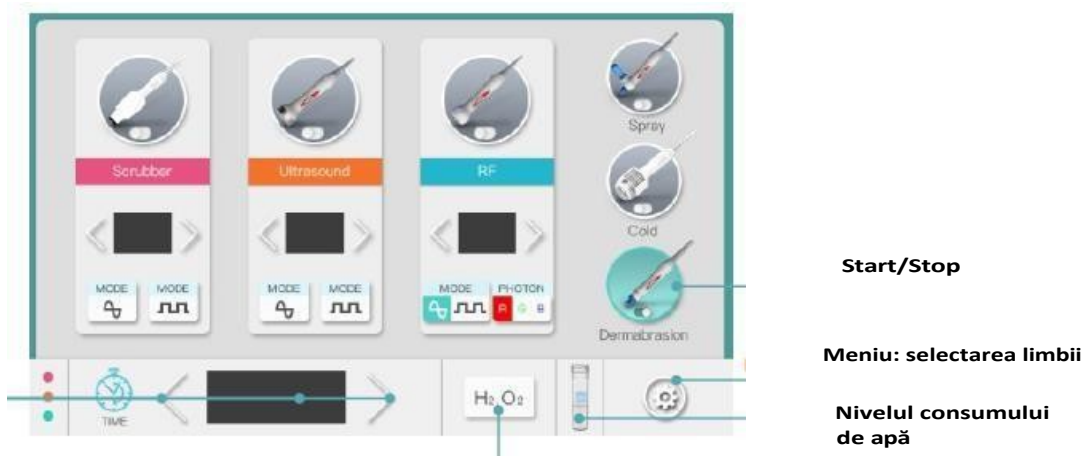

1. Porniți dispozitivul.
2. Utilizați cadranul pentru a selecta cilindrul corespunzător necesar pentru tratament.

Dacă este selectat cilindrul D (H₂O₂), apăsați butonul H₂O₂ (situat pe ecran).

3. Utilizați butonul de control al debitului de apă și al vidului pentru a regla debitul de apă și nivelul de vid dorit.
4. Selectați timpul de tratament.
5. Faceți clic pe pictograma hydrabrasion și începeți tratamentul.

Cilindri pe partea din față a dispozitivului:



Cilindrul A și B sunt utilizate pentru a aplica soluții de apă cu produsul de îngrijire corespunzător.

După fiecare tratament, turnați apă purificată/filtrată în cilindrul C pentru a curăța furtunurile și dispozitivul de produsul de îngrijire utilizat. Dacă aparatul nu este curățat în mod regulat, acest lucru poate duce la înfundarea tuburilor și la deteriorarea echipamentului. Turnăm apă în sticla D, plasăm duza de purificare a hidrogenului pe capul de purificare a hidrogenului*. Regândim jetul de apă la maxim și forța de vid la mediu și pornim dispozitivul. Durata este de aprox. 7-10 minute.

* Capetele de purificare a hidrogenului sunt incluse în livrare.

Sticla de apă reziduală și sticla D (H₂O₂) sunt amplasate în partea din spate a aparatului:



Se toarnă apă purificată/filtrată în cilindrul D (H₂O₂). Fenomenul de hidrogenare are loc în cilindrul D. Cilindrul D și sticla de apă uzată trebuie să fie bine strânse, altfel unitatea nu va funcționa corespunzător. Supravegheați nivelul apei uzate pentru a evita revărsarea și deteriorarea aparatului. Pentru a demonta butelia pur și simplu deșurubați-o și scoateți-o, pentru a o instala trebuie să o strângeți bine.

NOTĂ!

Înainte de a utiliza unitatea pentru prima dată, conectați-o în conformitate cu instrucțiunile de mai sus, apoi umpleți sticla corespunzătoare cu apă sau produs de îngrijire. Așezați duza de purificare a hidrogenului pe capul de purificare a hidrogenului. Rotiți consumul de apă la max. și forțați

selecțai pictograma capului de purificare a hidrogenului și porniți aparatul. Timp 7-10 min.

Întreținere

Inspectați unitatea și componentele de montare înainte de utilizare. Dacă cablurile electrice sunt deformate, rupte sau deconectate, înlocuiți cablurile cu unele noi.


Curățați temeinic aparatul și dezinfecțați capetele după fiecare tratament. Dacă doriți să curățați aparatul din exterior, mai întâi deconectați-l de la sursa de alimentare. Ștergeți-l cu o cârpă umedă și apoi uscați-l.

Înlocuirea siguranței

Specificațiile siguranței electrice de 8A ($\Phi 5 \times 20\text{mm}$)

Când înlocuiți siguranța, efectuați următorii pași:

- 1) Opriți aparatul utilizând butonul O/I;
- 2) Deconectați fișa de alimentare;
- 3) Deschideți carcasa siguranței cu o șurubelniță.
- 4) Scoateți siguranța defectă și înlocuiți-o cu o siguranță nouă.
- 5) Introduceți siguranța înapoi în poziția sa inițială;
- 6) Introduceți fișa în priză;

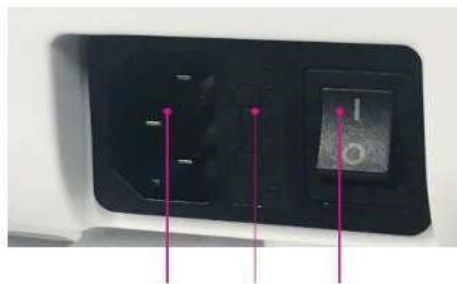

Priză de alimentare Întrerupător de siguranțe

ATENȚIE!

Atunci când înlocuiți siguranța, întrerupeți alimentarea cu energie electrică și deconectați ștecherul pentru a preveni electrocutarea.

Aparatul utilizat timp îndelungat (mai mult de un an) trebuie să fie întreținut de profesioniști. Aparatul trebuie amplasat într-un loc ventilat și uscat și trebuie ferit de praf și elemente externe atunci când nu este utilizat.

Probleme și depanare

Atunci când aparatul nu funcționează corect, contactați service-ul. Înainte de a recurge la service, verificați aparatul folosind următoarele sfaturi și vedeți dacă puteți rezolva singur problema.

Problema	Cauza	Metode de rezolvare
Aparatul nu funcționează după pornire.	Întrerupătorul de alimentare O/I este oprit. Întreruperea alimentării cu energie a siguranței. Întrerupătorul de alimentare este defect.	Verificați dacă ștecherul este pornit. Porniți butonul O/I. Înlocuiți siguranța.

Capul nu funcționează corect.	Nu se poate apăsa butonul de pornire. Instalarea incorectă a capului. Capul a fost deteriorat. Instalarea incorectă a cablului cu dispozitivul.	Apăsați butonul de pornire. Verificați dacă instalarea capului este corectă. Înlocuiți capul sau siliconul garnitură. Reinstalați capul.
Scurgeri de lichid	Garnitura de silicon este deteriorată sau lipsește. Instalarea incorectă a unității.	Capsați corect sticlele sau înlocuiți garnitura. Returnați unitatea la service pentru reparații.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal cosmetician calificat evită efectele nedorite în timpul tratamentului.
2. Dispozitivul nu trebuie dezasamblat sau încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în acest manual. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (compania ACTIVESHOP Ltd.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați service-ul autorizat oferit de ACTIVESHOP Sp. z o.o în următoarele cazuri:
(a) a pătruns lichid în aparat, (b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau face zgomote ciudate, (c) cablul de alimentare a fost deteriorat, (d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați aparatul într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu aparatul.
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață fixă a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de caracteristici. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și familiaritate cu echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea cu privire la modul de utilizare în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.

4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.

5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate reprezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Eliminați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare, în conformitate cu principiile de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipament. Pentru a proteja mediul în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aparatele electrice uzate trebuie colectate separat și predate la punctele de colectare a deșeurilor electrice și electronice.

Aparatele scoase din uz și cele vechi conțin componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru reciclare. Prin urmare, acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVSHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la temperaturi cuprinse între (-) 10 °C și (+) 40 °C numai în ambalajul său original. Depozitați aparatul într-o zonă bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.