


Procedura de asamblare a aparatului F-833


- 1) După despachetarea componentelor, demontați capacul posterior al coloanei folosind șurubelnița inclusă în pachet.



- 2) Cu ajutorul șuruburilor și șaiabelor incluse în pachet, fixăm coloana pe baza cu roți.

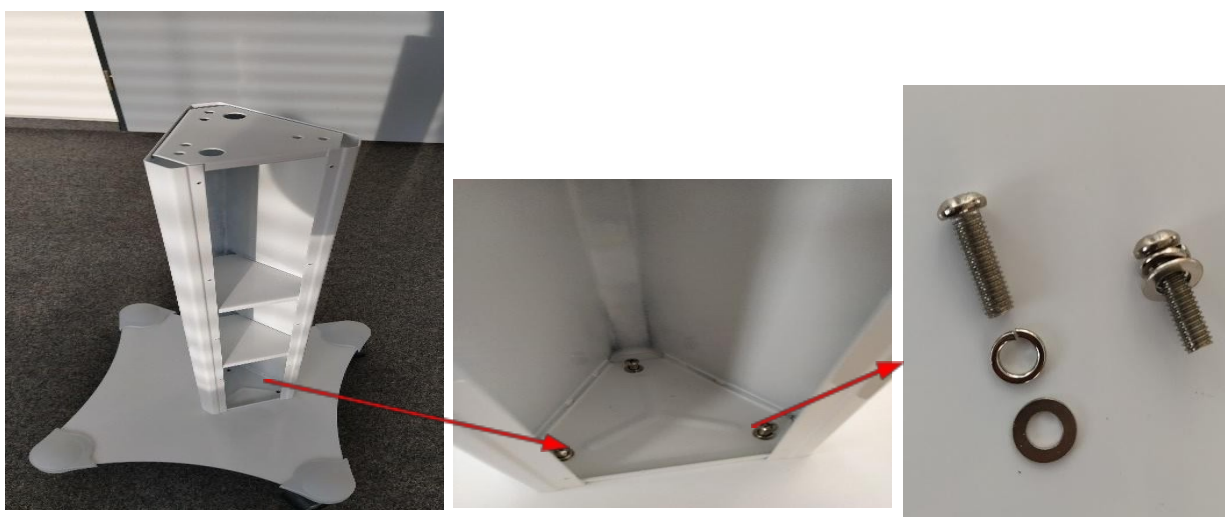

3) Așezați suportul de cauciuc pe partea superioară a coloanei, conform decupajelor.

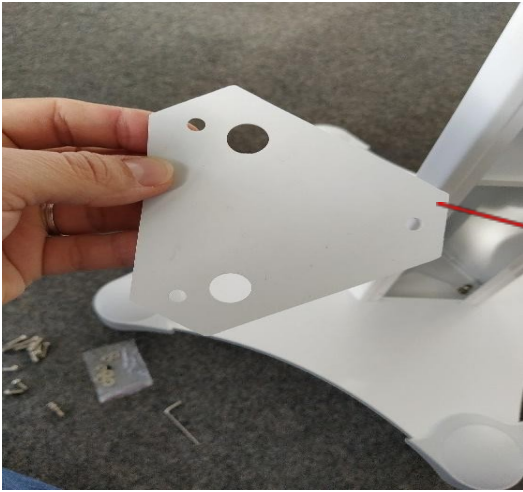

4) Așezați aparatul de masaj pe suportul de cauciuc și folosiți aceleași șuruburi ca în partea inferioară pentru fixare.



5) Fixăm suportul tăvii din plastic pe partea frontală a stâlpului folosind aceleași 4 șuruburi pe care le-am folosit până acum, dar fără a folosi șaibe. După fixarea suportului, introducem tava în cadru.



- 6) Fixăm suportul de depozitare pe partea stângă a stâlpului și a aparatului. Folosim 3 șuruburi, diferite de cele pe care le-am folosit până acum. Pentru fixarea în aparat folosim și șaibe. Șurubul care se fixează în stâlp nu are șaibă.



- 7) Fixăm furtunul aparatului de masaj cu ajutorul unei chei Allen. Verificați cu atenție dacă este complet introdus și suficient de bine fixat.



8) Înșurubați capacul de protecție al cablului în locul prevăzut.



9) Puneți capacul de protecție din plastic pe capul de masaj și înșurubați capul pe cablu.



10) Înșurubați capul pe capul aparatului de masaj, în funcție de partea corpului pe care doriți să o masați.



11) După conectarea la rețeaua electrică, aparatul este gata de utilizare.

