




## **Masă de terapie electrică Fabulo Nexus**

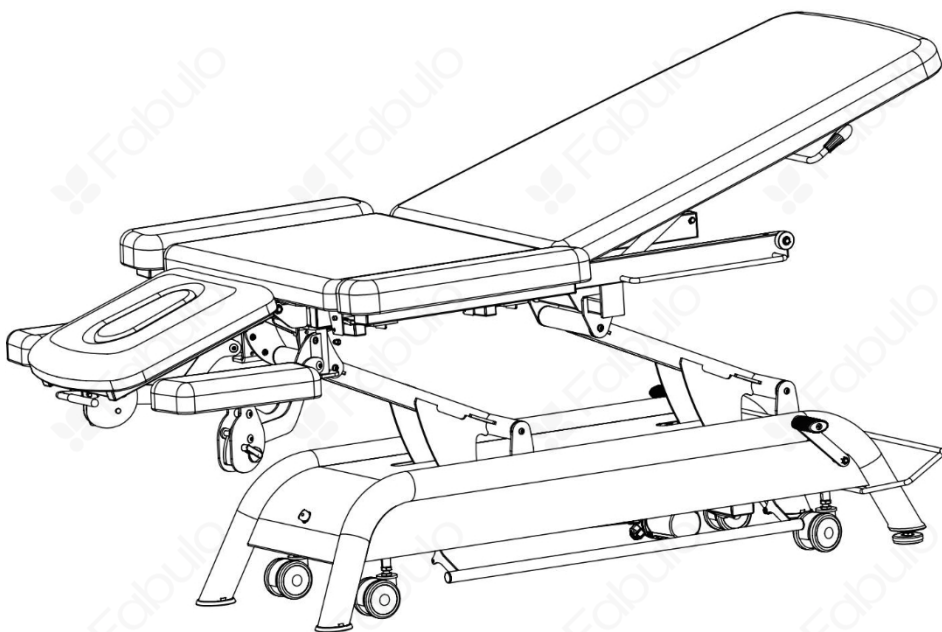




iM3 s.r.o.  
Malotejedská 515/8  
929 01 Dunajská Streda  
Slovakia

Fabulo.sk - Fabulo.cz - Fabulo.hu - Fabulo.ro

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de punerea în funcțiune.

# Specificații



## Fabulo Nexus XB1

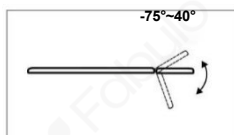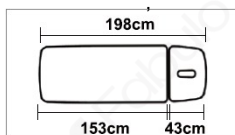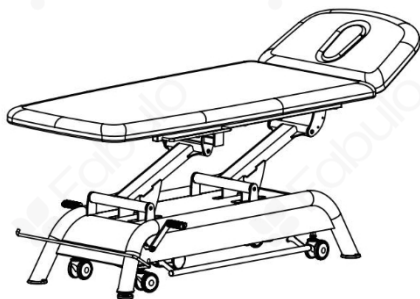

- Lungime: 78"/198cm
- Lățime: 27"/69cm, 29"/74cm
- Înălțime: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Spumă: 2.5"/6.5cm spumă fermă de înaltă densitate
- Reglare pneumatică a tetierei: -75°~40°
- Capacitate de lucru: 440lbs/200kg

RO

## Fabulo Nexus XC1

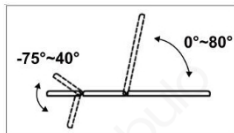
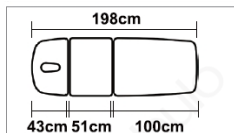


- Lungime: 78"/198cm
- Lățime: 27"/69cm, 29"/74cm
- Înălțime: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Spumă: 2.5"/6.5cm spumă fermă de înaltă densitate
- Reglarea pneumatică a tetierei: -75°~40°
- Reglarea pneumatică a spătarului: 0-80°
- Capacitate de lucru: 440lbs/200kg

# Specificații



RO

## Fabulo Nexus XF3

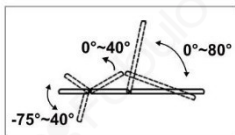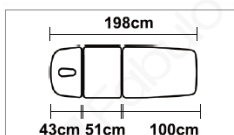

- Lungime: 78"/198cm
- Lățime: 27"/69cm, 29"/74cm
- Înălțime: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Spumă: 2.5"/6.5cm spumă fermă de înaltă densitate
- Reglarea pneumatică a tetei: -75°~40°
- Reglarea pneumatică a spatelui: 0-80°
- Reglare electrică la mijlocul cursei: 0-40°
- Capacitate de lucru: 440lbs/200kg




## Fabulo Nexus XR1

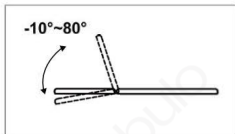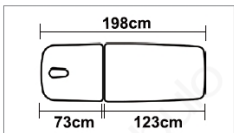

- Lungime: 78"/198cm
- Lățime: 27"/69cm, 29"/74cm
- Înălțime: 21"/53cm~37.5"/95cm
- Spumă: 2.5"/6.5cm spumă fermă de înaltă densitate
- Reglarea pneumatică a spatelui: -10°~80°
- Capacitate de lucru: 440lbs/200kg

# Specificații

## Fabulo Nexus XA1

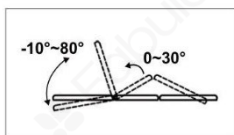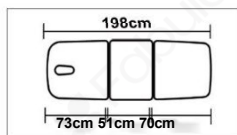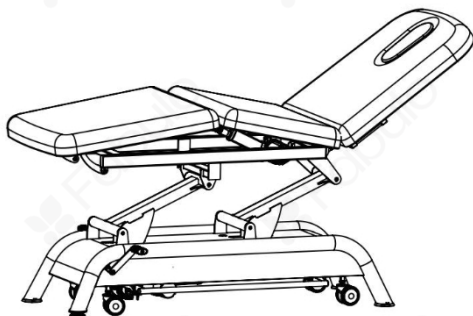

- Lungime: 78"/198cm
- Lățime: 27"/69cm, 29774cm
- Înălțime: 21"/53cm~37.5795cm
- Spumă: 2.5"/6.5cm spumă fermă de înaltă densitate
- Reglarea pneumatică a spătarului: -10°~80°
- Ridicare electrică în centru: 0-30°
- Capacitate de lucru: 440lbs/200kg


RO

# Instrucțiuni de utilizare

RO

## Putere

1. Scoateți masa din ambalaj și așezați-o pe o suprafață plană
2. Conectați fișa cablului de alimentare al mesei la o priză de perete
3. Înainte de fiecare utilizare, rotiți dispozitivul de blocare de siguranță în poziția "ON" (Fig. 1) pentru a permite conectarea la rețea.

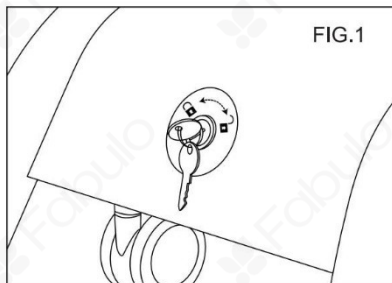

**Vă reamintim:**

- Încuietoarea de securitate trebuie instalată numai de către producătorul original și nu trebuie instalată în mod privat de către utilizatori.
- După plecarea medicului sau operatorului desemnat, deconectați alimentarea și scoateți cheia.

## Controlul înălțimii

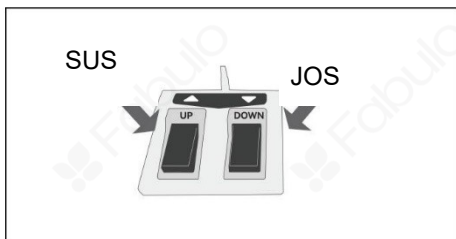


FIG.2

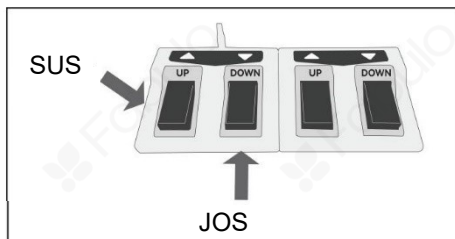


FIG.3

## Pedală de control

Utilizați pedala de control pentru a ridica sau a coborî înălțimea mesei, așa cum se arată în Fig. 2 sau Fig. 3.

# Controlul înălțimii

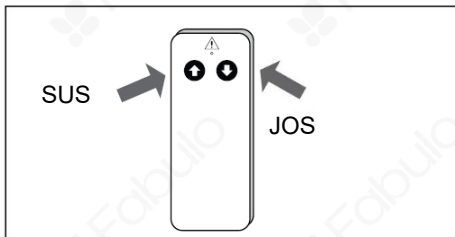


FIG.4

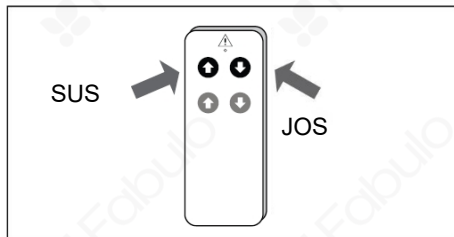


FIG.5

RO

## Control manual

Utilizați comanda manuală pentru a ridica sau coborî înălțimea mesei, după cum se arată în Figura 4 sau Figura 5.

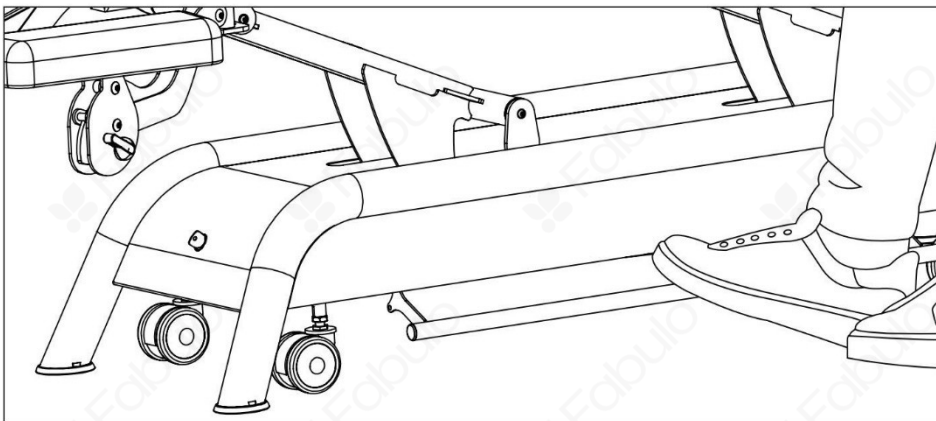


FIG.6

## Pedală de control

Sistemul Foot Control poate fi utilizat pentru a controla și regla înălțimea mesei. Împingerea separatorului în jos va crește înălțimea mesei, iar ridicarea separatorului în sus va reduce înălțimea patului (Fig. 6).

# Reglarea unghiului părții centrale a mesei

(Disponibil pentru Fabulo Nexus XA1, Fabulo Nexus XF3)

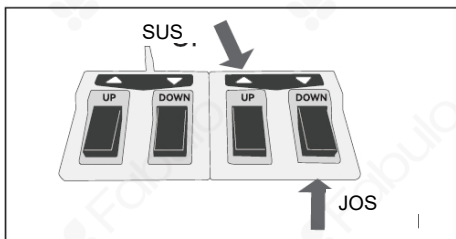


FIG.7

## Pedală de control

Utilizați pedala de control pentru a regla unghiul cursei de mijloc, după cum se arată în Fig. 7


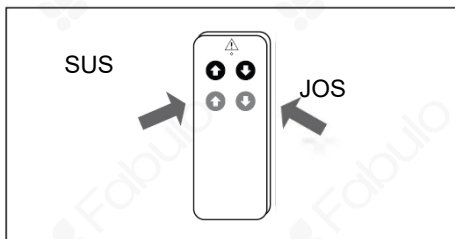


FIG.8

## Control manual

Utilizați comanda manuală pentru a regla unghiul cursei de mijloc, după cum se arată în Fig. 8

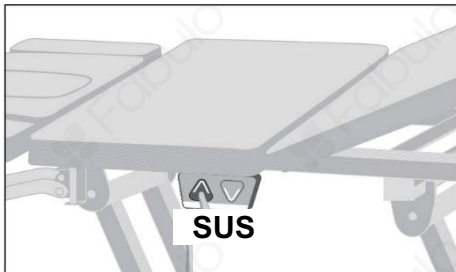

## Control pe panoul lateral

Comanda de pe panoul lateral poate fi utilizată pentru a regla unghiul secțiunii de mijloc. Apăsați butonul "Sus" pentru a crește unghiul mesei și apăsați butonul "Jos" pentru a-l reduce. Eliberați butonul atunci când suprafața mesei este la unghiul dorit.

# Instrucțiuni de utilizare

---

RO

## Reglarea cotieră față

Ridicați cotiera la înălțimea dorită (FIG. 9) și apoi coborâți-o prin rotirea în sus a declanșatorului de pe partea laterală a suportului. (FIG. 10)

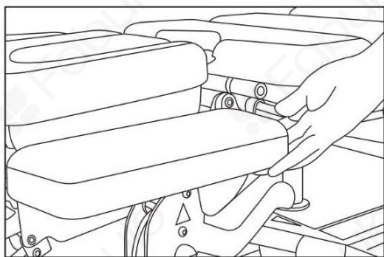


FIG.9

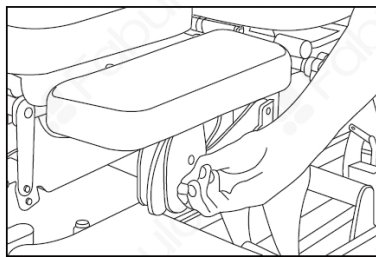


FIG.10

Ridicați cotiera din față în sus și rotiți-o pentru a-i regla poziția, după cum se arată în figura 11.

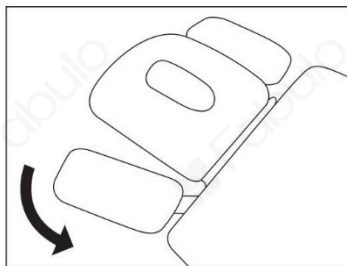


FIG.11

## Braț lateral extensibil pivotant reglabil

Prindeți cotiera laterală și glisați-o lateral pentru a o coborî.

Prindeți cotiera laterală, ridicați-o pe platforma metalică și așezați-o deasupra acesteia. (FIG. 12)

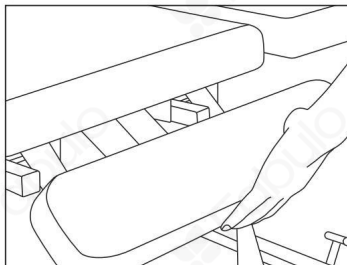


FIG.12

# Instrucțiuni de utilizare

---

## Reglarea unghiului tetierei

RO

Prindeți mânerul din secțiunea tetierei, ridicați-l sau coborâți-l la unghiul dorit și apoi eliberați-l.

(FIG.13 )



FIG.13

## Reglarea unghiului suportului pentru picioare

Cu o mână, trageți în sus de orice pârghie de sub secțiunea suportului pentru picioare a mesei în timp ce țineți partea superioară a mesei cu cealaltă mână. Ridicați-l sau coborâți-l la unghiul dorit și apoi eliberați-l. (FIG. 14)

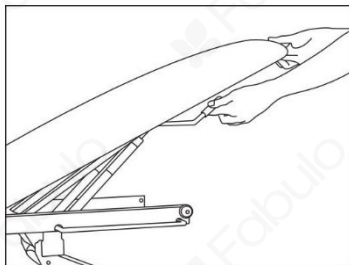


FIG.14

## Balustradă metalică pivotantă (accesoriu opțional)

**Coborâți balustrada:** trageți știftul de la capătul din față al balustradei metalice și înclinați-o în jos până când este perpendicular pe suprafața patului. Glisați știftul înapoi la atâ fixat balustrada metalică. (Figura 15)

**Instalarea balustradei:** Trageți știftul de la capătul frontal al balustradei metalice, rotiți balustrada până când este perpendicular pe suprafața patului și se fixează glisați înapoi pentru a bloca balustrada metalică. (Figura 15)

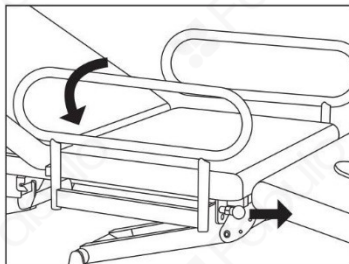


FIG.15

# Sistem de roți de rezervă

## Mișcarea de masă

Împingeți bara în jos cu piciorul pentru a elibera cele patru roți, apoi mutați bara pe o suprafață plană. (FIG.16)

**Aveți grijă cu picioarele în timpul funcționării.**

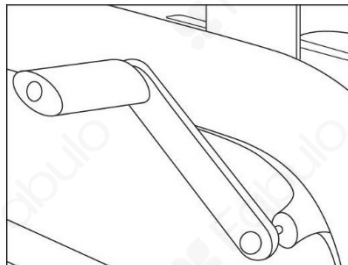


FIG.16

RO

## Garanție

| Cadru de masă     | Drive             | Accesorii         | Tapițerie         | Pompă pneumatică |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Garanție de 5 ani | Garanție de 3 ani | Garanție de 2 ani | Garanție de 2 ani | Garanție de 1 an |

- Toate garanțiile sunt limitate la piese de schimb din fabrică, reparații în fabrică sau înlocuire, cu excepția cazului în care produsul a fost returnat pe cheltuiala dumneavoastră.
- Aceste garanții reprezintă întreaga garanție oferită. Nu există alte garanții sau garanții, fie ele exprese sau implicite.
- Garanția acoperă numai defectiunile mecanice care apar în timpul utilizării normale. Orice deteriorare artificială, modificare neautorizată, transport necorespunzător, utilizare necorespunzătoare, abuz sau utilizare în afara domeniului de aplicare al acestui manual nu mai este acoperită de garanție.

## Instrucțiuni de siguranță

Această masă de terapie electrică Fabulo Nexus Series îndeplinește normele de siguranță. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca deteriorarea corpului uman, a obiectelor și a produsului. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare.

Acest manual conține informații importante privind funcționarea în siguranță și utilizarea corectă pentru a proteja corpul uman de răni și pentru a preveni deteriorarea produsului. Dacă în timpul utilizării apar următoarele condiții, producătorul nu își asumă nicio garanție sau răspundere pentru vătămări corporale, daune materiale, deteriorarea produselor sau a altor elemente.

## Instrucțiuni de siguranță

---

- Utilizatorul are sub 18 ani
- Utilizarea dincolo de funcționalitatea produsului
- Pacientul are un handicap fizic sau senzorial sau o inteligență scăzută și nu are experiență sau cunoștințe relevante.
- Utilizare incorectă
- Ridicarea de obiecte care depășesc capacitatea de încărcare a produsului
- Mutarea și transportul folosind echipamente de protecție defecte sau ineficiente
- Modificări neautorizate ale designului echipamentului
- Utilizarea continuă a produsului după ce au fost detectate daune structurale
- Întreținere necorespunzătoare
- Catastrofe externe și forță majoră
- Expunerea echipamentului la frig, căldură, soare și umiditate extreme

## Riscuri electrice

---

- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l imediat pentru a evita riscul de electrocutare.
- Nu utilizați dispozitivul pe podele ude sau în medii umede. Temperatura ambiantă trebuie menținută între 10 °C și 30 °C
- Nu utilizați echipamentul într-un mediu în care sunt prezente gaze sau vapori inflamabili sau explozivi.

## Risc de accidente

---

- Nu plasați în niciun caz obiecte sau părți ale corpului în structură pentru a preveni deteriorarea obiectelor sau rănirea în cazul în care echipamentul se ridică sau se prăbușește în mod neașteptat.
- Nu stați pe echipament pentru a preveni căderea sau răsturnarea acestuia.

## Îngrijirea pielii

---

- Pentru a preveni crăparea husei de piele a saltelei, evitați mediile umede, apa pe suprafața patului și mediile reci sau supraîncălzite.
- Curățați cu un detergent neutru; ștergeți și uscați bine.
- Evitați contactul obiectelor ascuțite sau dure cu suprafața de piele.